

DMaske

Die Maske aus Deutschland.

Leistungen der PSA

- ✓ Partikelfiltrierende Halbmaske ohne Ventil gemäß Europäischer Verordnung über persönliche Schutzausrüstungen 2016/425, Risikokategorie III (Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stoffen und Gemischen sowie schädlichen biologischen Agenzien)
- ✓ Zum Schutz gegen Partikel gemäß Norm EN 149:2001+A1:2009, Schutzklasse FFP2 NR
- ✓ Geeignet für den einmaligen Gebrauch
- ✓ Maskeninnenseite hautverträglich gemäß ÖKOTEX 100
- ✓ Made in Germany

Materialien

- ✓ Vliese: PP (Polypropylen)
- ✓ Ohrband: PES, EA (Polyester, Elasthan)
- ✓ Nasenclip: Stahl-Draht in PE-HD (Hart-Polyethylen)
- ✓ Kopfbügel: PP (Polypropylen)
- ✓ Entsorgung: über Hausmüll

Sitz der Maske

Drücken Sie den Nasenclip fest an die Nase, so dass ein dichter Sitz gewährleistet ist. Prüfen Sie den Dichtsitz der Maske durch einen Atemtest. Hierbei muss die Maske beim Einatmen merklich an das Gesicht gesaugt werden.

Falls Luft um die Nase herum in die Maske eintritt, korrigieren Sie den Sitz mit Hilfe des Nasenclips. Sollte der Sitz der Maske allgemein zu lose sein, verdrehen Sie die Ohrbänder jeweils um 180° in Form einer Acht. Ist der Sitz der Maske immer noch zu lose, nutzen Sie einen Kopfbügel.

Optionales Zubehör

Kopfbügel: Falls die Ohrbänder für die Kopfform zu lang sind, kann der Kopfbügel eingesetzt werden, siehe An- und Ablegen der Maske mit Kopfbügel.

Lagerung

Empfohlene Lagerbedingungen:
Temperatur 5-30°C, Luftfeuchtigkeit <60%
Beachten Sie das Verfallsdatum auf der Verpackung.

An- und Ablegen der Maske ohne Kopfbügel

①



Öffnen Sie die Maske mit dem Nasenclip oben und legen Sie diese über Mund und Nase.

②



Die Kante muss mit dem Nasenclip auf dem Nasenrücken liegen. Richten Sie die Maske aus und drücken Sie den Nasenclip an Ihren Nasenrücken.

③



Legen Sie die Ohrbänder auf beiden Seiten über die Ohren.

④



Prüfen Sie die Dichtigkeit der Maske.

Zum Ablegen der Maske streifen Sie die Ohrbänder nach vorne über die Ohren ab. Die Außenseite der Maske kann mit Aerosol belastet sein. Vermeiden Sie den Kontakt.

– bitte wenden –

Mögliche Probleme

Es ist unwahrscheinlich, dass die Anforderungen an Leckage erfüllt werden, falls sich Gesichtshaare zwischen der Dichtlinie der Maske und dem Gesicht befinden.

Die Maske bietet einen Schutz gegen Partikel, keine Schutzwirkung besteht gegen gasförmige Stoffe.
Stellen Sie eine ausreichende Güte der Luft in Bezug auf (gasförmige) Verunreinigungen und Sauerstoffgehalt sicher; nicht in explosionsfähiger Atmosphäre einsetzen.

Falls die Maske beschädigt ist, bitte nicht mehr benutzen.
Sitzt die Maske nicht dicht (siehe Sitz der Maske), kann keine ausreichende Schutzwirkung gewährleistet werden.
Die Maske nur mit sauberen Händen anlegen, um Verschmutzung zu vermeiden. Die Maske schützt nicht vor Dolomitstaub.

Anwendungsdauer

Die Maske ist für die Benutzungsdauer von einer Arbeitsschicht (ca. 8 Std.) bei normaler Beanspruchung vorgesehen.
Die Maske ist nur für den einmaligen Gebrauch geeignet.

Die Maske sollte gewechselt werden, sobald...

...die Dichtigkeit der Maske nicht mehr gegeben ist, bspw. durch ein Loch, oder falls sie nach längerem Gebrauch nicht mehr eng anliegt.

...der Luftwiderstand spürbar ansteigt, wenn die Maske bspw. durch Verunreinigung durchnässt ist.

D/Maske
Die Maske aus Deutschland.

Hersteller

D/Maske www.d-maske.de
exbert GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 50
59423 Unna

Benannte Stelle




Universal Certification and
Surveillance Service Trade Ltd. Co.
Istanbul, Turkey

EU-Konformitätserklärung

Einzusehen unter:
www.d-maske.de/eukonformitaetserklaerung

An- und Ablegen der Maske mit optionalem Kopfbügel

①

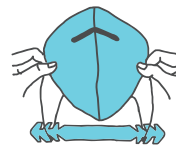

Legen Sie beide Ohrbänder je links und rechts in je den mittleren Halter des Kopfbügels ein.

②



Öffnen Sie die Maske oben mit dem Nasendclip und legen Sie diese über Mund und Nase, so dass die Kante mit dem Nasenclip auf Ihrem Nasenrücken liegt.

③



Ziehen Sie den Kopfbügel auf beiden Seiten über den Kopf, so dass die Ohrbänder auf jeder Seite über und unter den Ohren liegen.

④



Überprüfen Sie nun den Sitz der Maske: Falls die Maske zu locker sitzt, spannen Sie die Ohrbänder in eine engere Lasche des Kopfbügels ein. Falls die Maske zu eng sitzt, spannen Sie die Ohrbänder in eine weitere Lasche des Kopfbügels ein.

Zum Ablegen der Maske streifen Sie den Kopfbügel zusammen mit den Ohrbändern über die Ohren und über den Kopf nach vorne. Die Außenseite der Maske kann mit Aerosol belastet sein. Vermeiden Sie den Kontakt.